




KIT DE CRYOTHÉRAPIE MAGNÉTIQUE : CRYO-GUÊTRES

Effets 3 en 1 :

- Cryothérapie
- Compression
- Champ magnétique

NOTRE SYSTÈME

Les Guêtres Equi'Nov ont été conçues pour favoriser la récupération après un traumatisme ou après l'effort. Nos Guêtres ont une action antalgique et génèrent des effets anti-hémorragique, anti-cédémateux, et myorelaxant.

Notre tissu magnétique  réduit la douleur et les gonflements, tout en stimulant la circulation sanguine. Il favorise l'élimination des toxines et accélère les processus de guérison et de récupération. Enfin, il permet de préparer les muscles et les tendons à l'effort.

Les guêtres sont vendues par paire.

- Placer les guêtres au minimum 8h au congélateur, avant utilisation. Cependant, si les guêtres sont remises au congélateur dès la fin d'une séance de cryothérapie, 2 h de congélation seront alors suffisantes pour préparer la prochaine séance.

- Une séance de cryothérapie doit durer 20 à 30 minutes maximum.

- Appliquer entre 5 et 10 pressions avec la pompe, en fonction du ressenti et des préférences du cheval.

Nos Guêtres constituent un dispositif de cryothérapie légère qui permet d'accéder aux zones difficiles à traiter, comme dans les cas de blessures profondes des tendons, ou de lacérations.


La combinaison de ces effets permet à nos produits d'être un outil indispensable pour une récupération plus rapide avec une rééducation facilitée et moins douloureuse.



Taille des Guêtres	S	M	L	XL
Taille en cm ©	30	34	38	42

Les mesures sont approximatives, chaque cheval est différent, le tableau n'a qu'un rôle informatif.

Taille simplifiée	Poney	COB	Cheval	Cheval
Hauteur du canon	26 cm	28 cm	30 cm	36 cm
Tour du boulet	25 cm	30 cm	33 cm	36 cm
Antérieure	S	M	L	XL
Postérieure	M	L	XL	XL

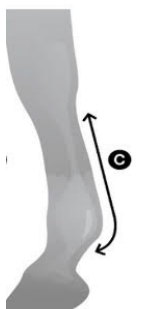



KIT DE CRYOTHÉRAPIE MAGNÉTIQUE : GRASSET


Effets 3 en 1 :

- Cryothérapie
- Compression
- Champ magnétique

NOTRE SYSTÈME

Nos kits Equi'Nov ont été conçus pour favoriser la récupération après un traumatisme ou après l'effort.

Ils ont une action antalgique et génèrent des effets anti-hémorragique, anti-œdémateux, et myorelaxant.

Notre tissu magnétique  réduit la douleur et les gonflements, tout en stimulant la circulation sanguine. Il favorise l'élimination des toxines et les processus de guérison et de récupération. Enfin il permet de préparer les muscles et les tendons à l'effort.

Disponible en taille universelle ajustable.

- Placer les poches de froid au minimum 8h au congélateur, avant utilisation. Cependant, si les poches sont remises au congélateur dès la fin d'une séance de cryothérapie, 2 h de congélation seront alors suffisantes pour préparer la prochaine séance.

- Une séance de cryothérapie doit durer 20 à 30 minutes maximum.

Nos kits constituent un dispositif de cryothérapie légère qui permet d'accéder aux zones difficiles à traiter, comme dans les cas de blessures profondes des tendons, ou de lacérations.

La combinaison de ces effets permet à nos produits d'être un outil indispensable pour une récupération plus rapide avec une rééducation facilitée et moins douloureuse.





KIT DE CRYOTHÉRAPIE MAGNÉTIQUE : JARRET

Effets 3 en 1 :


- Cryothérapie
- Compression
- Champ magnétique



NOTRE SYSTÈME

Nos kits Equi'Nov ont été conçus pour favoriser la récupération après un traumatisme ou après l'effort.

Ils ont une action antalgique et génèrent des effets anti-hémorragique, anti-œdémateux, et myorelaxant.

Notre tissu magnétique  réduit la douleur et les gonflements, tout en stimulant la circulation sanguine. Il favorise l'élimination des toxines et les processus de guérison et de récupération. Enfin il permet de préparer les muscles et les tendons à l'effort.

Disponible en taille universelle ajustable.

Le kit jarret est vendu à l'unité.

- Placer le kit au minimum 8h au congélateur, avant utilisation. Cependant, si le kit est remis au congélateur dès la fin d'une séance de cryothérapie, 2 h de congélation seront alors suffisantes pour préparer la prochaine séance.

- Une séance de cryothérapie doit durer 20 à 30 minutes maximum

- Appliquer entre 5 et 10 pressions avec la pompe, en fonction du ressenti et des préférences du cheval.

Nos différents kits constituent un dispositif de cryothérapie légère qui permet d'accéder aux zones difficiles à traiter, comme dans les cas de blessures profondes des tendons, ou de lacérations.

La combinaison de ces effets permet à nos produits d'être un outil indispensable pour une récupération plus rapide avec une rééducation facilitée et moins douloureuse.



COUVERTURE MAGNÉTIQUE


- Réduit la douleur et les gonflements.
- Stimule la circulation sanguine.
- Accélère l'élimination des toxines.
- Accélère le processus de guérison et de récupération.
- Prépare les muscles et les tendons à l'effort.



NOTRE TISSU MAGNÉTIQUE

(Couverture et dispositifs de cryothérapie magnétique)

Notre tissu magnétique est fabriqué grâce à une technologie issue de recherches menées conjointement sur le champ magnétique et la minéralogie. La combinaison de minéraux génère un champ magnétique qui agit directement sur le pH de la molécule d'eau, principal constituant de la matière vivante.

Notre tissu magnétique  réduit la douleur et les gonflements, tout en stimulant la circulation sanguine. Il favorise l'élimination des toxines et les processus de guérison et de récupération. Enfin il permet de préparer les muscles et les tendons à l'effort.

Disponible en 3 tailles :

- 135 / 183 / 6.0
- 145 / 190 / 6.3
- 155 / 206 / 6.9

